

Gengigel® First-aid

Medicinski proizvod klasa II b

Posebno oblikovan da obezbedi jednostavnu, brzu i efikasnu primenu.

Idealan za nanošenje na rane u usnoj šupljini i tokom postoperativne faze.

Hijaluronska kiselina je fiziološki najvažniji proteoglikan, koji se prirodno nalazi u vanćelijskom matriksu sluzokože, gde deluje zajedno sa drugim sastojcima vezivnog tkiva, čime obezbeđuje elastičnost sluzokože usne duplje, što je značajno za oralno zdravlje.

Hijaluronska kiselina ima brojna svojstva, koja doprinose uspešnom stomatološkom tretmanu i održavanju oralne higijene.

Hijaluronska kiselina ima sposobnost apsorpcije 50 puta veće količine vode od sopstvene mase. Ovo svojstvo omogućava da hijaluronska kiselina deluje kao štit, sprečava prodor mikroorganizama i drugih toksina, koji doprinose razvoju parodontalnih bolesti.

Gengigel® First-aid

- Sadrži hijaluronsku kiselinu neživotinjskog porekla, biotehnološki proizvedenu, visokokvalitetnu i veoma čistu, u obliku natrijumove soli visoke molekularne težine.
- Ima dugotrajno lokalno delovanje.
- Čvrsto prijanja uz sluzokožu zbog jedinstvene prirodne formulacije.
- Mogu ga primenjivati svi bez ograničenja, odrasli i deca, trudnice, stariji i dijabetičari.

Indikacije

Gengigel® First-aid

- Primenjuje se za zarastanje rana srednjeg stepena

- Smanjuje bol i neprijatnost, posebno nakon traumatskih stanja, hirurških ili parodontalnih intervencija, ugradnje implantata, vađenja zuba, struganja i poliranja korena zuba.
- Ubrzava antiedematozni i antiinflamatorni proces.

Način primene

Odmah nakon stomatološke intervencije isperite usta sa 5 ml (1 merica) oralnog rastvora u trajanju 1-2 minuta.

Nakon pravilne oralne higijene, postupak ponovite 2-4 puta dnevno, osim ako vam stomatolog ne preporuči drukčije.

Rastvor je pripremljen za upotrebu, nije ga potrebno razređivati.

Pakovanje

Gengigel® First-aid 50 ml bočica sa mericom.

Upozorenja

Kod potvrđene preosetljivosti na sastojke proizvoda, primena se ne preporučuje.

Čuvati na temperaturi 5°C - 40 °C.

Proizvođač:

RICERFARMA srl
Via Egadi, 7 - 20144 Milano, Italija
www.ricerfarma.com

Nosilac upisa: Medis Pharma d.o.o., Milutina Milankovića 11b, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija

Broj i datum upisa u registar u RS:
515-02-01733-13-001 od 6.3.2014.

200062000